

ANWEISUNG FÜR DEN GEBRAUCH

Den Kopfhörer aufsetzen



- 1 Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF Schalter ein
- 2 Setzen Sie den Bügel an den Hinterkopf, oberhalb des Nackens
- 3 Setzen Sie die Ohrhörer auf die Knochen vor dem Ohr
- 4 Stellen Sie das Mikrofon 3 cm entfernt vom Mund und leicht rechts ein

Die Übungen

Die Arbeit mit dem Forbrain® sollte als ein Training betrachtet werden. Am besten täglich, 6 bis 10 Wochen lang.



Sitzhaltung



ÜBER FORBRAIN®

Forbrain® ist ein Gerät der Firma SOUND FOR LIFE Ltd, spezialisiert darin, Technologien zu entwickeln, welche die Wahrnehmung verbessern.

SOUND FOR LIFE Ltd. besitzt viele namhafte Patente und Marken. Forbrain® wurde in Zusammenarbeit mit AFTERSHOKZ LLC entwickelt, dem Weltmarktführer auf dem Gebiet der Knochenleitertechnologie. Es wird weltweit, durch ein Netz spezialisierter Händler, vertrieben.



Bett Awards 2015 Gewählt als Beste Lösung für besondere Anforderungen im Gewinner Bildungsbereich. Bett Show Großbritannien, Die internationale Messe für Technologien im Bildungsbereich.



Gekürt als bestes Produkt des **Family Choice Award**, einem Wettbewerb in den USA, der in den letzten 20 Jahren Familien geholfen hat, die besten Produkte und Technologien auszuwählen.



Forbrain® wurde in einer Studie der Universität Barcelona, mit dem Titel: Neuronale Mechanismen, denen Forbrain® Wirkungen zu Grunde liegen, wissenschaftlich beurteilt. Abgeschlossen am 15. Juni 2015. Die Studie zeigte die Wirksamkeit von Forbrain®, bei der Verbesserung von Sprache, des Aufmerksamkeitsniveaus und der Handhabung von Stress.



Mehrere Versuchsstudien werden momentan an Universitäten und Klinischen Studien Zentren in den USA, Spanien und Polen geleitet.

Mit freundlicher Empfehlung von :

Affiliation Nummer 10% Rabatt

Mehr Tipps und Information auf
www.forbrain.com

Forbrain® ist kein Medizinprodukt und ist nicht dazu gedacht, eine medizinische Behandlung zu ersetzen.
Forbrain® ist eine Lernhilfe und wird von Gesundheitsbehörden nicht anerkannt.

FORBRAIN®

Nutzen Sie Ihre Stimme, um die Leistung Ihres Gehirns zu steigern



AUFMERKSAMKEIT

SPRACHE

GEDÄCHTNIS



EINE EINZIGARTIGE, PATENTIERTE TECHNOLOGIE

Forbrain® fungiert als ein Audio-vokales Training. Wenn Sie sprechen, wird der Klang Ihrer Stimme augenblicklich, durch diese einzigartige Gerät, mittels eines dynamischen Filters korrigiert.

Die Töne werden mittels Knochenleitung sofort wieder zu Ihnen zurückgeführt. Das geschieht durch Vibration der Knochen, die sich vor den Ohren befinden. Sie hören kein Echo, jedoch hören Sie Ihre Stimme anders.

Der dynamische Filter

Wenn Sie Forbrain® benutzen, werden Sie Ihre eigene Stimme gefiltert und durch einen Frequenz modulierenden Filter wahrnehmen.

Dieser Filter ist dynamisch. Das heißt, er schaltet sich ein und aus, je nach dem welche Töne Sie von sich geben. Er ist so programmiert, dass die hohen Frequenzen verstärkt und die tiefen abgeschwächt werden. Wenn Sie beginnen, Wörter und lange Vokale auszusprechen, wird dieser Vorgang ausgelöst. Die sogenannten 'hellen Töne' werden hervorgehoben, die eine sehr wichtige Rolle in der Sprachentwicklung spielen.

Dieser extrem empfindliche, dynamische Filter ermöglicht es Ihnen, Ihre korrigierte Stimme zu hören. Das hat zur Folge, dass sich Ihre Sprechweise sofort und ohne bewusste Anstrengung verbessert. Ihre Stimme wird rhythmischer, klangvoller und harmonischer.

Knochenleitung

Wenn Sie mit dem Forbrain® sprechen, wird Ihre Stimme durch die Knochenleitung sofort zu Ihnen zurückgeführt. Diese Tonübertragung wird bedingt durch die Vibration der Knochen, die sich vor dem Ohr befinden.

Diese Art der Übertragung ist 10 Mal schneller, als über die Luft und von einer wesentlich besseren Qualität. Dies ist die natürlichste Art sich selbst zu hören.

Die Knochenleitung erlaubt es Ihnen daher, Ihre Stimme sehr klar und natürlich zu hören.

AKTIVES TRAINING DER SINNE

Forbrain® ist ein einzigartiger Ohrhörer, der Ihrem Gehirn hilft, Sinnes Informationen effektiver zu verarbeiten.

Durch die Korrektur Ihrer Stimmwahrnehmung, wird Ihre Sprechweise auf natürliche Art und ohne bewusste Anstrengung korrigiert.

Dies wird als Effekt der Audio-vokale Schleife bezeichnet.

Forbrain arbeitet gleichzeitig an allen Teilen dieser Audio-vokalen Schleife und ermöglicht dem Nervensystem somit ein **exzellentes Training der Sinne**.

ANWENDUNGEN

Aufmerksamkeit

Unsere Fähigkeit, aufmerksam zu sein, hängt von unserem allgemeinen Wachheitszustand ab, das es dem Nervensystem ermöglicht, aufnahmebereit für jegliche Form eingehender Information zu sein.

Allerdings braucht das Gehirn Reize, um optimal zu funktionieren. Diese werden hauptsächlich durch das Ohr empfangen. Die hohen Frequenzen unserer Stimme haben eine wichtige, anregende Wirkung für das Gehirn. Hier setzt Forbrain an und fördert die Übertragung dieser hohen Frequenzen und arbeitet somit an diesem Zustand kortikaler (Hirnrinde) Wachheit.

Der dynamische Filter erzeugt außerdem Variationen in der Stimmstärke und im Klang. Dadurch wird das Gehirn fortwährend überrascht und in einem Zustand der Wachheit gehalten.

Das soll helfen, diese automatischen Mechanismen der Wechsel Erkennung und Anpassung zu stärken. So wird unser Grad der Wachheit gefördert.

Sprache

Sprache wird charakterisiert durch eine komplexe Reihe artikulierter Töne, die in einem ganz bestimmten rhythmischen Muster angeordnet sind. Dieser Rhythmus basiert auf der Größe der Schwingung, der Dauer und Betonung der erzeugten Töne.

Sprache hängt von unserer Fähigkeit ab, diese Töne bewusst zu erzeugen. Dies zu schaffen, erfordert eine kontinuierliche Anpassung, zwischen den Tönen, die wir aussprechen und was unser Ohr empfängt, hauptsächlich über die Knochenleitung; bekannt als phonologische Bewusstheit.

Gedächtnis

Das Gedächtnis spielt eine wichtige Rolle bei allen Lernprozessen, angefangen mit dem Lesen. Es ist hauptsächlich unser Kurzzeitgedächtnis, auch bekannt als phonologisches Gedächtnis, das uns ermöglicht, sprachliche Informationen für eine schnelle Analyse zu speichern.

Es ist das sprachliche Gedächtnis, das wir benutzen, wenn wir einen Text lesen. Es ermöglicht uns auch, einem Text einen Sinn zu geben, ihn mit Zeichensetzung und Rhythmus zu strukturieren. Es versetzt uns auch in die Lage, ein Gespräch zu führen und Gedankengängen zu folgen. Das sprachliche Gedächtnis ist verbunden mit dem Bewusstsein der Aussprache in der Sprache, mit anderen Worten, mit dem Grad der Aufmerksamkeit auf die Mitteilung, welche ausgesprochen und empfangen wird.

Der Forbrain® Filter betont den Sprachrhythmus und die Knochenleitung fördert seine Integration. Dadurch wird unsere Fähigkeit gefördert, die Mitteilung zu behalten.

